



**handicap**  
TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

## Návod k použití



Berle francouzská  
**FD 93**

## Berle francouzská FD 93 Handicap

### Určený účel

Berle francouzská FD 93 Handicap je určena k odlehčení dolní končetiny a/nebo zajištění stability při nemožnosti užití standardní bipedální lokomoce.

### Vlastnosti z hlediska účinnosti

Odlehčuje dolní končetinu a zajišťuje stabilitu při různých poúrazových, pooperačních nebo degenerativních stavech.

### Indikace

- Nutnost trvalého či dočasného odlehčení váhy nesené dolními končetinami při různých poúrazových, pooperačních či degenerativních stavech s přítomnou dostatečnou silou a koordinace horní části těla k opoře a pohybu vlastní tělesné hmotnosti.
- Doléčení stavů po distorzích, kontuzích v oblasti dolní končetiny.

### Kontraindikace

- Těžké degenerativní či potraumatické změny v oblasti horní končetiny přebírající nosnou funkci za dolní končetiny (zejména pak ramenního či zápěstního kloubu) vylučující použití berlí.
- Nedostatečná síla či koordinace horní části těla umožňující pohyb či oporu váhy vlastního těla.

### Zbytkové riziko

Není známo.

### Cílová skupina

Pacienti s výše uvedenou indikací poučeni odborníky z daného klinického oboru.

## Upozornění pro pacienta

- Berli používejte pouze pro určený účel.
- Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (tj. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážně zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení ohybem, tj. v úhlu přesahujícím 30° od svislé polohy.
- Berle je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do **150 kg!**
- Přibližně po 1 měsíci užívání proveďte kontrolu berle, při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je nutno ho vyměnit za nový originální díl nebo berli vyřadit z používání.
- K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berli otřít do sucha.
- Nesmí být použito organických rozpouštědel.

## Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



## Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebením berle způsobené jejím obvyklým užíváním. Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

**Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.**

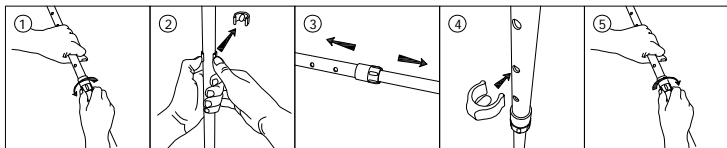
## Rozměry a hmotnost




### FD 93 ( FD 93 dlouhá)

Délka berle min.:	970 (1 105) ± 10 mm
Délka berle max.:	1 195 (1 330) ± 10 mm
Vzdálenost rukojeť - lok. opěrka:	235 ± 2 mm
Vzdálenost rukojeť - země min.:	765 (895) ± 10 mm
Vzdálenost rukojeť - země max.:	990 (1 120) ± 10 mm
Hmotnost:	600 (620) g ± 5 %

## Nastavení délky berle

1. Uvolní se pojistná matice otáčením proti směru hodinových ručiček (1).
2. Vyjme se třmen s kolíkem (2).
3. Dolní nástavec se vysune na přibližně potřebnou výšku (3), přesná výška se nastaví vybráním jednoho ze dvou otvorů v dolním nástavci.
4. Zpřesní se poloha otvorů nosníku dolního nástavce a zasune se třmen s kolíkem (4).
5. Proveďte se pojištění nastavené délky dotažením pojistné matice otáčením ve směru hodinových ručiček (5).



Zdravotnický prostředek **MD**  
je určený pro jednoho pacienta   
Skladujte na suchém místě ,  
chráněném před slunečním zářením 

 **Handicap trade s.r.o.**  
Bystrcká 612/15  
624 00 Brno  
ČESKÁ REPUBLIKA  
[www.berle.cz](http://www.berle.cz)

Datum poslední revize: 01.2.2022

