



handicap
TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Návod k použití



Hůl dřevěná
HD 95

Název výrobku
Hůl dřevěná HD 95

Popis a určený účel

Hůl dřevěná HD 95 je určena k odlehčení dolní končetiny a/nebo zajištění stability, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť.

Hůl se vyrábí s rovnou nebo zahnutou rukojetí v jedné velikosti **950 mm**.

Upozornění pro pacienta

- Hůl používejte pouze pro určený účel.
- Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.
- Hůl je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do **100 kg!**
- K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha. Nesmí být použito organických rozpouštědel.

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení hole způsobené jejím obvyklým užíváním. Reklamace se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

Skladujte na suchém místě



chráněném před slunečním zářením



Handicap trade s.r.o.

Bystrcká 612/15

624 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

www.berle.cz

Datum poslední revize: 01.06.2022