



handicap
TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Návod k použití



Hůl duralová
HS 95 / LYRA

Hůl duralová stavitelná HS 95 Hůl duralová stavitelná měkčená LYRA

Popis a určený účel

Hůl duralová stavitelná HS 95 / LYRA je určena k odlehčení dolní končetiny a/nebo zajištění stability, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážné zatížení vzpěrem.

Upozornění pro pacienta

- Hůl používejte pouze pro určený účel.
- Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.
- Hůl je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do **130 kg!**
- Přibližně po 1 měsíci užívání proveďte kontrolu hole, při případném poškození nebo opotřebení některého dílu je nutno ho vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání.
- K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha. Nesmí být použito organických rozpouštědel.

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.




Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení hole způsobené jejím obvyklým užíváním. Reklamacе se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

Rozměry a hmotnost


Délka hole min.:	815 mm ± 10 mm
Délka hole max.:	1 040 mm ± 10 mm
Hmotnost:	480 g ± 5 %

1. nosník
2. nástavec
3. třmen s kolíkem
4. pouzdro
5. závitová matice
6. vymešovací vložka
7. rukojeť
8. násadec

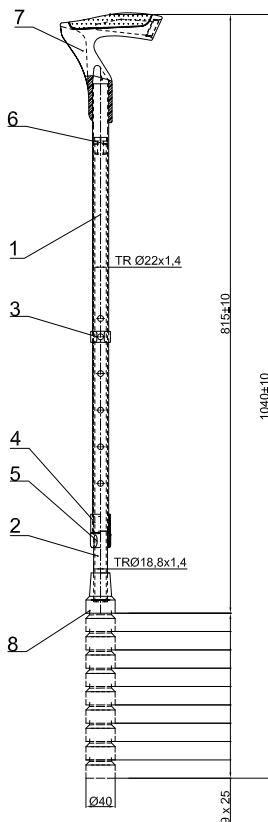

Nastavení délky hole

1. Uvolní se pojistná matice otáčením proti směru hodinových ručiček (1).
2. Vyjme se třmen s kolíkem (2).
3. Dolní nástavec se vysune na přibližně potřebnou výšku (3), přesná výška se nastaví vybráním jednoho ze dvou otvorů v dolním nástavci.
4. Zpřesní se poloha otvorů nosníku dolního nástavce a zasune se třmen s kolíkem (4).
5. Proveďte se pojištění nastavené délky dotažením pojistné matice otáčením ve směru hodinových ručiček (5).

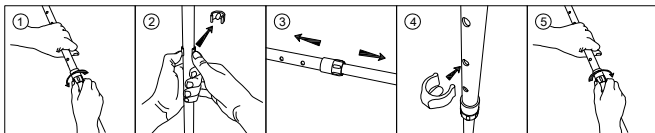

Skladujte na suchém místě ,
chráněném před slunečním zářením .



Handicap trade s.r.o.

Bystrcká 612/15

624 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

www.berle.cz



Datum poslední revize: 01.06.2022