



handicap
TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Návod k použití



Irigátor



8 594209 030583

Název prostředku

Irigátor Handicap

Účel a vlastnosti prostředku

Irigátor Handicap je pomůcka určená k zavádění klystýru a k provádění výplachů. Odstraňuje nahromaděné nežádoucí mikroorganismy z tlustého střeva a konečníku.

Upozornění pro pacienta

- Irigátor používejte pouze pro daný účel.
- Pro snazší navlečení irigační hadice na ústí nádržky (zejména byl-li irigátor skladován v chladnějším prostředí) doporučujeme navlékaný konec irigační hadice promnout mezi prsty nebo na chvíli namočit do vody cca 60°C teplé.
- Hadičku se doporučuje zavádět pomalu do konečníku v poloze na boku. Případný odpor neprekonávejte silou, ale hadičku mírně povytáhněte a potom opět opatrně zasouvejte.
- Běžnou údržbu můžete provádět teplou vodou a mýdlem, či ostatními mycími prostředky. Nepoužívat organická rozpouštědla!
- **Použití by mělo být nejprve konzultováno s lékařem!!**

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.




Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení irigátoru způsobené jeho obvyklým užíváním. Reklamacе se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

Rozměry a hmotnost

Závěsná nádržka:	2 litry
Irigační hadice:	1,5 m
Konečnicková hadice:	300 mm (ø 10 mm)
Hmotnost:	300 g ± 5 %

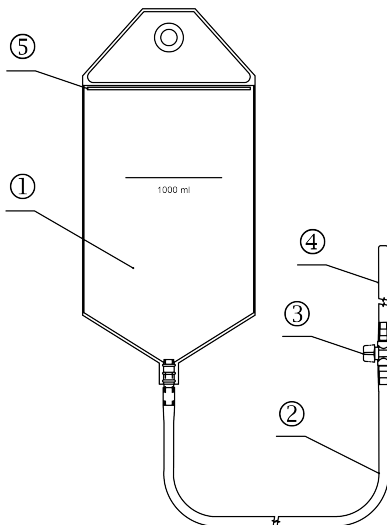

Použití

Na ústí nádržky **1** (vývod) se navlékne irigační hadice **2**. Na druhý konec hadice se nasadí dvoupolohový kohout **3**, na který se nasadí přiložená trubice **4**. Po sestavení irigátoru se uzavře kohout (ovládací páčka je kolmo na osu kohoutu), nádržka se otvorem pro plnění **5** naplní tekutinou (plnit po rysku) a zavěsí. Po zavedení trubice do konečnicku se kohout otevře a tekutina začne proudit trubicí.

Skladujte na suchém místě ☂ , chráněném před slunečním zářením ☀.



Handicap trade s.r.o.

Bystrcká 612/15

624 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

www.handicaptrade.cz



8 594209 030583

Datum poslední revize: 15.05.2023