



handicap
TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Návod k použití



**Nástavec protiskluzový
jednohrotý**

Nástavec protiskluzový jednohrotý

Popis a účel výrobku

Protiskluzový nástavec slouží jako doplněk holí a berlí při jejich použití na kluzkém terénu (sníh, náledí). Připevňuje se na hůl nebo berli pomocí dvoudílné objímky a může být trvale namontován. Je určen pro francouzské berle FD 93, VERA, FDD 91, ELLA a hole H 81, HS 95, LYRA, HS 01 a HD 95. Lze ho také použít u holí a berlí jiných výrobců, jejichž hole nebo berle mají nosník o průměru 17 – 19,5 mm. Nástavec je konstruován pouze pro užívání ve funkční poloze (t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi), pro převážné zatížení vzpěrem.

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení nástavce způsobené jeho obvyklým užíváním.

Rozměry a hmotnost

Základní rozměry viz obrázek.
Hmotnost nástavce: 75 g ± 5 %

Nasazení nástavce

Stiskneme plastové koncovky (4) protiskluzového nástavce ve směru šipek a sklopíme hrot (2) do funkční polohy viz obr.

- Odšroubujeme šrouby (3) a sejmemo volný díl objímky.
- Protiskluzový nástavec nasadíme na hůl nebo berli, přiložíme volný díl objímky, šrouby zašroubujeme, lehce dotáhneme.

