



handicap
TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Návod k použití



**Násadec protiskluzový
šestihrotý**

Násadec protiskluzový šestihrotý

Popis a účel výrobku

Násadec je určen pro lokomoční pomůcky k tlumení rázů při jejich používání na kluzkém terénu (sníh, náledí). Na pomůcku se nasazuje jako běžný násadec. Při dočasném užívání v interiérech se na vlastní násadec nasadí krycí miska, chránící hroty před opotřebením a podlahové krytiny před poškozením.

Je určen pro francouzské berle FD 93, VERA, FDD 91, ELLA a hole H 81, HS 95, LYRA, HS 01. Násadec lze použít i pro lokomoční pomůcky jiných výrobců, mají-li nosník o $\varnothing 17,75 - 18,8 \text{ mm} \pm 0,5$.

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení násadce způsobené jeho obvyklým užíváním.

Rozměry a hmotnost

Základní rozměry viz obrázek.

Hmotnost násadce: $110 \text{ g} \pm 5 \%$

Výměna násadce

Poškozený nebo opotřebovaný násadec sejměte tahem za mírného pootáčení.

Zkontrolujte stav konce nosníku a v případě, že již došlo k jeho poškození zarovnejte dosedací plochu a odstraňte případný otřep pilníkem.

Nasadte nový násadec na nosník berle nebo hole a tlakem proti tvrdé podložce zatlačte nosník až na dno násadce.

