



ERILENS s.r.o.
Papírenská 114/5
160 00 Praha 6

tel.: 234 123 355
e-mail: reha@erilens.cz
www.erilens.cz



Poutko k vycházkové holi



Použití výrobku

Poutko slouží k zavěšení vycházkové hole na západě a usnadňuje tím činnosti, při kterých jsou potřeba obě ruce volné např. při nastupování do dopravních prostředků, nákupech apod.

Popis výrobku

Poutko je určeno zejména pro hole vyráběné firmou ERILENS s.r.o. Vyrábí se v jedné velikosti a lze jej použít i na hole jiných výrobců, které mají průměr nosníku pod držadlem v rozsahu 17 – 22 mm.

Na hůl se poutko upevňuje navlečením pružné objímky s kroužkem do místa přechodu mezi nosníkem hole a jejím držadlem. Vlastní poutko je odnímatelné pomocí karabinky, kterou je spojeno s kroužkem objímky. Délka poutka se reguluje posunem sedlářské vsuvky.

Hmotnost

Hmotnost poutka je $8 \text{ g} \pm 3 \%$.

Rozměry

Obvod poutka	$320 \pm 10 \text{ mm}$
Průměr objímky	17 - 22 mm

Údržba

Poutko lze prát při teplotě vody max. 40°C , za použití běžných pracích prostředků. Nesušit v blízkosti zdroje sálavého tepla, nežehlit! Nesmí být použito organických rozpouštědel.

Ekologická informace


Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin. Výrobek je zhotoven zdravím neškodných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek zlikvidujte jako běžný domovní odpad.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6
VÝROBEK: POUTKO K VYCHÁZKOVÉ HOLI
ČÍSLO PN: 0273/E/99



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb.
Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

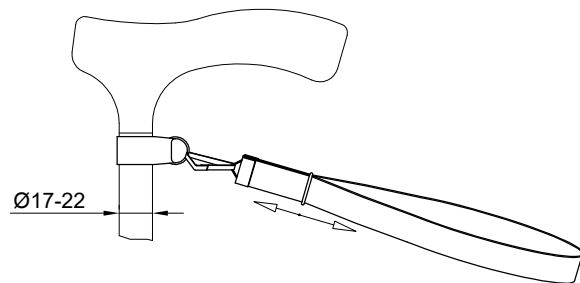

ZNAČKA KONTROLY:



DATUM PRODEJE:

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 1.8.2020



RAZÍTKO PRODEJNY