

ERILENS s.r.o.
Papírenská 114/5
160 00 Praha 6

tel.: 234 123 355
e-mail: reha@erilens.cz
www.erilens.cz



Poutko k berli



Použití výrobku

Poutko slouží k zavěšení berle na zápěstí a usnadňuje tím činnosti, při kterých jsou potřeba obě ruce volné např. při nastupování do dopravních prostředků, nákupech apod.

Popis výrobku

Poutko je určeno zejména pro berle vyráběné firmou ERILENS s.r.o. Vyrábí se v jedné velikosti a lze jej použít i na berle jiných výrobců, které mají průměr v rozsahu 25 – 40 mm.

Na berli se poutko upevňuje navlečením pružné objímky s kroužkem do místa, kde chceme poutko umístit. Vlastní poutko je odnímatelné pomocí karabinky, kterou je spojeno s kroužkem objímky. Délka poutka se reguluje posunem sedlářské vsuvky.

Hmotnost

Hmotnost poutka je 8 g $\pm$ 3 %.

Rozměry

Obvod poutka	320 $\pm$ 10 mm
Průměr objímky	25 - 40 mm

Údržba

Poutko lze prát při teplotě vody max. 40°C, za použití běžných pracích prostředků. Nesušit v blízkosti zdroje sálavého tepla, nežehlit! Nesmí být použito organických rozpouštědel.

Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin. Výrobek je zhotoven zdravím neškodných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek zlikvidujte jako běžný domovní odpad.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6
VÝROBEK: POUTKO K BERLI
ČÍSLO PN: 0273/E/99




Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb.
Reklamacie se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:




DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 1.8.2020

DATUM PRODEJE:

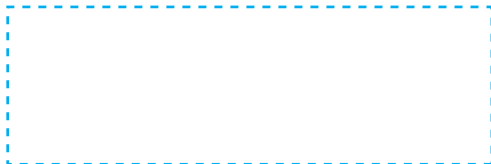

RAZÍTKO PRODEJNY

Montážní návod:

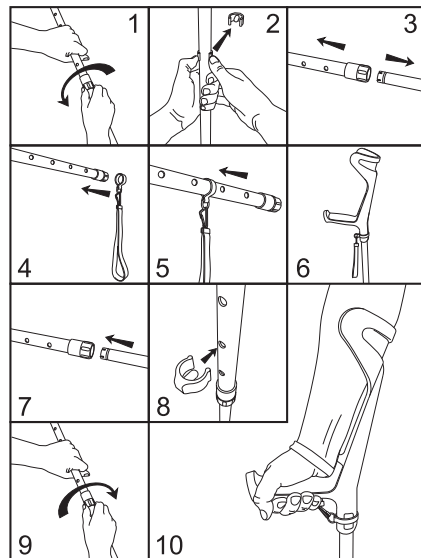

- Obr. 1 Uvolnit pojistnou matici
- Obr. 2 Vyjmout třmen s kolíkem
- Obr. 3 Vysunout (rozpojit) obě trubky
- Obr. 4 Na silnější trubku (nosník) navléknout pružnou objímku
- Obr. 5,6 Pružnou objímku posunout přes trubku a umístit ji na spodní část monobloku
- Obr. 7 Nasunout (spojit) obě trubky
- Obr. 8 Trubky zajistit třmenem
- Obr. 9 Utáhnout pojistnou matici
- Obr. 10 Poutko nasunout na ruku