

Hůl skládací duralová

PN 0200/E/01

HS 01

1. Použití výrobku

Hůl se používá v případech, kdy je dostačující pouze mírné jednostranné odlehčení přenášené na hůl rukou držící rukojeť. Je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze, t.j. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi a pro převážné zatížení vzpěrem.

Hůl není konstruována pro zatížení ohybem, zatížení v její vodorovné poloze a v poloze do sklonu 45°.

Je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg!

2. Popis výrobku

Hůl skládací duralová HS 01 má tyto hlavní části:

- nosník (1x spodní díl, 2x střední díl, 1x horní dvoudílný nastavitelný díl)
- rukojeť
- pružinu
- jednostranná aretovací pružina s kolíkem
- pojistná závitová matice
- násadec

Nosník hole je tvořen pěti díly vyrobených z duralových trubek (spodní díl, 2x střední díl 1x horní dvoudílný nastavitelný díl). Horní konce spodního a středních dílů jsou zúženy a spodní konce středních dílů a výsuvné části horního dílu jsou kuželovitě rozšířeny což umožňuje spojení všech dílů. Horní díl je ukončen pevně zasazenou rukojetí. Spodní díl je opatřen tlumícím násadcem. Spojení všech dílů je provedeno pružným lanem, jehož jeden konec je upevněn ve výsuvné části horního dílu a druhý ve spodním dílu. Hůl lze nastavit na 7 délek po 20 mm.


3. Hmotnost

Hmotnost hole HS 01

cca 380 g $\pm$ 3%

4. Rozměry

Délka hole ve funkčním stavu min.	820 $\pm$ 10mm
Délka hole ve funkčním stavu max.	940 $\pm$ 10mm
Délka hole ve složeném	cca 300 mm

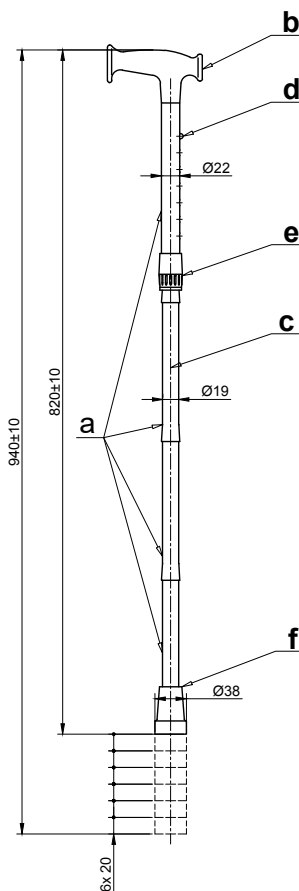

ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA

tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz



5. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů hole. Při případném poškození nebo opotřebením některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo hůl vyřadit z používání. Zejména je třeba zkontrolovat pryžovou pružinu (při porušení opletení nebo ztrátě pružnosti je třeba provést její výměnu) a zajišťovací mechanismus nastavování délky (pružina s kolíkem). K čištění hole lze použít běžné saponátové přípravky a pak hůl otřít do sucha.

Nesmí být použito organických rozpouštědel.

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6

VÝROBEK: HŮL SKLÁDACÍ DURALOVÁ

TYP: HS 01

ČÍSLO PN: 0200/E/01



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebením hole způsobené jejím obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamáce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



DATUM PRODEJE:

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 1.10.2019

RAZÍTKO PRODEJNÝ

 **ERILENS s.r.o.**

Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
tel: +420 234 123 355 e-mail: info@erilens.cz www.erilens.cz

