

## Ochranná bota Qmed

Ochranná bota je vyrobena z prodyšného materiálu s otvorenou konštrukciou špičky. Botu lze díky otvorené konštrukci snadno nasadiť. Pevná výstuž v päte udržuje nohu v správnej poloze, zaisťuje nadštandardné ovládanie pohybu prednej časti chodidla, a tým je zaisťované, že pooperačné hojenie zostane nerušené. Upevňovací systém na suchý zip umožňuje prispôbivú deformáciu boty obväzom. Pásy na suchý zip usnadňujú otváranie a zapínanie boty. Protiskluzová podrážka zaisťuje stabilnú príľnavosť k podkladu. Ochrannú botu lze uzavrieť, viz obrázky. Uzavretá ochranná bota pak chráni prsty. V závislosti na okolnostech môže mať ochranná bota otvorenú alebo uzavretú prednú časť. Botu lze použiť jak na ľavú tak na pravú nohu.

Indikace:

- po ortopedických operáciách v oblasti prednej časti nohy
- ako ochrana náplasti alebo obväzu
- pri otáčaní nohou pokiaľ nelze použiť bežnou obuv

### Upozornění!

Před použitím boty se poraďte se svým ošetrojícím lekárom. Zvláštnu pozornosť by mala byť venovaná pri použití výrobku pacientem se smyslovými poruchami v oblasti nohou.

### Materiál:

Bota: plátuo, PU penová vrstva / Podrážka: EVA

Čistenie možné len v studenej vode s použitím šetrného mydla. Nepoužívajte biľidlo.

### Označení: DRQI3R

| Velikost     | S       | M     | L       | XL      |
|--------------|---------|-------|---------|---------|
| Délka stélky | 24,6 cm | 26 cm | 27,8 cm | 29,8 cm |

### Správné umístění špičky



1. Jednotlivé díly ochranné boty.
2. Přilepte díl č. 2 do špičky boty tak, aby kopíroval botu.
3. Poté suchým zipem připevněte díl č. 3 do špičky boty.
4. Ochranná bota s uzavretou špičkou. Díl č. 2 není určen pro vícenásobné použití. Jakmile je jednou k botě připevněn, neměl by být již odstraňován, aby byla zachována jeho funkce.

### Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź, Poland

[www.mdhprofilaktyka.pl](http://www.mdhprofilaktyka.pl)

### Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: [meyra@meyra.cz](mailto:meyra@meyra.cz)

[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)



Vydání: 05-2016